

NovoPen® 6 快速指南

此处显示
胰岛素
剂量记录



NovoPen® 6



这是一个快速指南。欲了解完整信息，请参阅 NovoPen® 6 随附的使用说明。

安装 NovoPen® 6



装入胰岛素笔芯

拔下笔帽，拧下笔芯支架。活塞杆可能会从笔中伸出。请将其推至尽头。



将新的胰岛素笔芯插入笔芯支架，螺纹端先插入。将笔芯支架拧回原位。



安装新的针头

撕下标签纸。将针头竖直插入笔身并拧紧。取下两个针帽。保留外面的针帽。

进行注射



⚠ 注射前务必检查胰岛素是否能流出

选择2个单位并按下剂量按钮直至剂量计数器显示“0”。当您看到胰岛素从针头喷出，并且活塞杆头和活塞之间不再有空隙时，胰岛素流动性测试就完成了。



选择剂量

拉出剂量按钮。开始前确认剂量计数器显示“0”。转动剂量按钮选择您需要的剂量。



慢慢计数

1-2-3-4-5-6

注射药剂


插入针头。按下剂量按钮直至剂量计数器显示“0”。从皮肤上拔出针头之前，请慢慢数到6。安全地取出并扔掉针头。重新盖上笔帽。

如何查看上次注射的计量



拉出剂量按钮

开始前确认剂量计数器显示“0”。

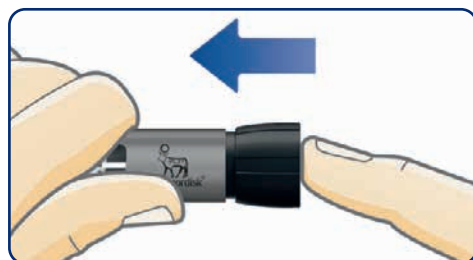

将剂量按钮推回原位

剂量记忆将会显示上次注射剂量的详细信息。



阅读您的剂量记忆

以上范例显示1小时52分3秒前，注射了12个单位的药剂。

如何使用 NovoPen® 6

观看此快速指南，了解如何安装 NovoPen® 6 并完成注射。



扫描 QR 码，
观看视频



NovoPen® 6 是诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) 的注册商标。
Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. ABN 40 002 879 996. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060.
Novo Nordisk Customer Care (澳大利亚) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au
© 诺和诺德公司的注册商标。AU23NP600023. NONOCH0039. 编制时间：2023年9月。

NovoPen® 6

NovoPen® 6 以 1 单位剂量为增量，最大可提供 60 单位的药剂。