

NovoPen® 6))

La tua NovoPen® 6 in sintesi




NovoPen® 6



Ago monouso




Cartuccia Penfill®

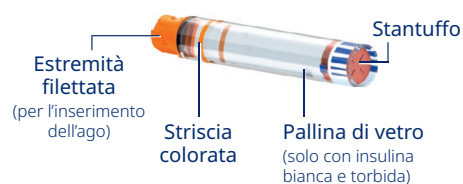

Guida rapida all'uso **passo-per passo**

INSERISCI LA CARTUCCIA PENFILL® E INSERISCI L'AGO

1° PASSO Rimuovi il cappuccio della penna

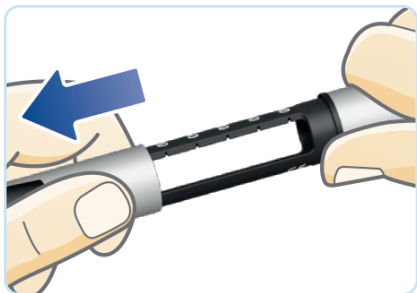


2° PASSO Svita l'alloggiamento della cartuccia




3° PASSO Inserisci la cartuccia, iniziando dall'estremità filettata




4° PASSO Riavvita l'alloggiamento della cartuccia finché non senti o avverti uno scatto

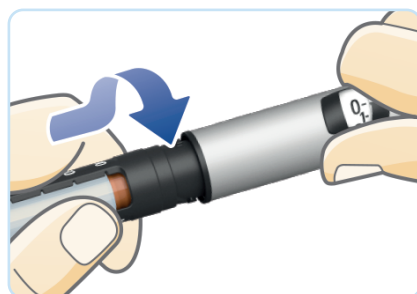

5° PASSO Rimuovi il sigillo protettivo di carta da un nuovo ago e spingi l'ago direttamente nella penna

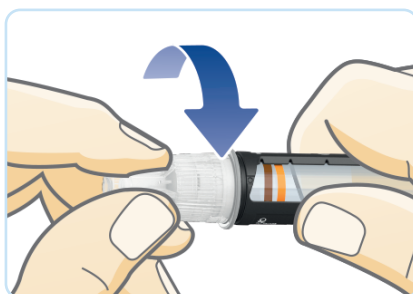


6° PASSO Rimuovi il cappuccio esterno e il cappuccio interno dell'ago. Conserva il cappuccio esterno per lo smaltimento sicuro dell'ago

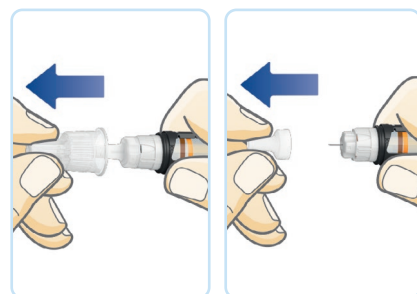

Per una spiegazione completa di come usare la tua NovoPen® 6, leggi le istruzioni per l'uso in dotazione con la penna. Volta pagina per importanti informazioni in materia di sicurezza.

CONTROLLA SEMPRE IL FLUSSO DELL'INSULINA DOPO L'INSERIMENTO DI UNA CARTUCCIA PENFILL®

- 1° PASSO** Tira in fuori il pulsante della dose e ruotalo per selezionare **2 unità**.
- 2° PASSO** Premi il pulsante della dose finché il contatore della dose mostra **0** e si allinea con l'indicatore di dose.
L'insulina dovrebbe fuoriuscire dall'ago
- 3° PASSO** Poi controlla la finestrella dell'insulina per accertarti che non vi sia uno spazio vuoto tra la testa dello stantuffo e lo stantuffo.

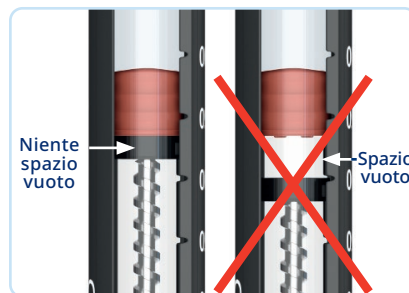

Se l'insulina non appare **OPPURE** se vi è uno spazio vuoto, ripeti i passi 1-3 finché la penna è pronta per l'uso.



Se non controlli il flusso dell'insulina potresti non ricevere la dose completa di insulina.

INIETTA L'INSULINA

1° PASSO Con il contatore della dose su **0**, tira in fuori il pulsante della dose e ruotalo per selezionare il numero di unità che desideri iniettare.



2° PASSO Inserisci l'ago e premi il pulsante della dose finché il contatore di dose mostra **0**. Conta lentamente fino a **6** prima di rimuovere l'ago.



Rimuovi e smaltisci in modo sicuro l'ago e rimetti il cappuccio dell'ago.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Come faccio a sapere se è rimasta insulina a sufficienza per la prossima dose?

Ruota il pulsante della dose finché non si arresta. Il contatore della dose mostrerà:

- **60** il che indica che vi sono **almeno 60 unità** nella cartuccia, oppure
- un numero inferiore a 60 indicando **esattamente** quante unità sono rimaste

Se la cartuccia non contiene sufficiente insulina per la dose successiva, sostituiscila con una nuova Penfill®.

Posso rimuovere e sostituire una cartuccia Penfill® parzialmente usata?

SÌ. Se rimuovi una cartuccia Penfill® e poi la rimetti sulla NovoPen® 6 **DEVI** controllare di nuovo il flusso dell'insulina come spiegato sopra.

Perché lo stantuffo è allentato?

Se non vi è Penfill® nella penna, lo stantuffo potrebbe muoversi avanti e indietro. **Questo è normale.**

SE TI SERVONO MAGGIORI INFORMAZIONI O SUPPORTO



Visita il programma di assistenza al paziente NovoCare® per trovare informazioni sull'insulina e sulle risorse NovoPen® 6 tra cui video su come usare la penna - www.novocare.com.au



Domande su come usare la penna o problemi di natura tecnica? Chiama Novo Nordisk Medical Information - **1800 668 626**

NovoPen® 6

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
ABN 40 002 879 996. Novo Nordisk Medical Information (Australia) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au.
© Marchio commerciale registrato della Novo Nordisk A/S. NONO0Y0148. AU24NP600017. Agosto 2024.

